

ElektroPen

Yeni Nesil Mikro İğneleme

ElektroPen

Yeni Nesil Mikro İğneleme



@elektrokozmetikmedikal

elektro
medikal

www.elektromedikal.com.tr

elektro
medikal



HIGH
QUALITY

En yüksek hızlarda optimum güç için entegre kablo,

Titanyum iğne uçları paslanmaz ve kopmaz,



HIGH
PERFORMANCE

Hız ve derinlik ayarları için yüksek kalite bitiş ve iç mekanizma,



HIGH
SECURITY

Cildi yırtmayan, düzgün iğne giriş ve çıkışını sağlayan dikey uygulama,

ElektroPen

Çeni Nesil Mikro İğneleme

- ➔ Yüksek hız mikro iğneleme ,
- ➔ Risksiz uygulamalar,
- ➔ Düşük sarf maliyeti,
- ➔ 2 yıl garanti,
- ➔ Kişisel tedavi ihtiyaçları için çoklu motor hızı,
- ➔ 8 yıllık tecrübe ve deneyim,
- ➔ Hasta ve uygulayıcı konforu için ergonomik tasarım,
- ➔ Yüz, vücut ve kafa derisi gibi değişik bölgelere uyarlanmış tedaviler için ayarlanabilir iğne derinliği,
- ➔ İğnenin sorunsuz takılıp çıkarılması için kolay klik sistemi.

ElektroPen nasıl bir uygulamadır?

Ucunda 12 adet milimetrik iğne bulunan ElektroPen cilt yüzeyinde yüzlerce mikroskopik delme yapan, böylece cildin kendi, doğal iyileşme mekanizmasını başlatan mikro iğneleme yöntemidir.

ElektroPen uygulaması nasıl etki eder?

Bu tedavide amaç, en az epidermal hasar ile, ciltte kontrollü bir çok küçük yara oluşturarak, deride yeniden yapılanma sağlar.

Uygulama esnasında 0,25 - 2,5 mm uzunluğu aralığında ayarlanabilen iğneler ile üst deride 1cm² 'de 250-500 mikrokanal oluşturulur. Açılan bu kanalların her biri deride bir yara gibi algılanır. Cilt bu yaraları kapatmak için o bölgede kan dolaşımını artırır, çeşitli büyüme faktörleri salgılayarak kendini onarmaya çalışır. Ayrıca işlem sırasında deri yüzeyine uygulanan çeşitli vitaminler, enzimler ve hatta PRP çözümü, açılan bu mikrokannallardan deri altına iletilmek üzere kullanılabilir. Soznuçta kolajen ve elastin üretimi tetiklenir ve o bölgede cilt yenilenmesi meydana gelir.

ElektroPen ağrılı bir işlem midir?

Uygulama öncesi sürülen lokal anestezi kremiyle, işlem sırasında ağrı hissi olmaz.

Uygulama sonrası nelere dikkat edilmelidir?

Tedavi sonrasında deride ortaya çıkan hafif pembeleşme, ufak kanama alanları ve yanma hissi, ortalama 6 saat içerisinde azalacak ve 1-2 gün içerisinde kendiliğinden kaybolacaktır. İşlem sonrasında güneşten korunulmalıdır. İki gün boyunca aşırı spor, sıcak duş, sauna, hamam, solarium uygulamasından kaçınılması önerilir.

ElektroPen kaç seans uygulanır ve uygulama sıklığı nasıldır?



Uygulama amacı ve işlem yapılan bölgeye göre değişmekle beraber
2-10 seans uygulanır. İki işlem arası
1-4 hafta kadardır.

Etkisi ne zaman görülmeye başlar?

İşlemden ortalama 6 hafta sonra gözle görülen sonuçlar başlar, maksimum etki 3 ayda elde edilir. Elde edilen sonuç kalıcıdır. Oldukça güvenli bir uygulamadır. Her yaşta, her tür cilt tipinde, yaz aylarında dahi yapılabilir.

ElektroPen Uygulanma Alan ve Derinlikleri


ElektroPen
Yeni Nesil Mikro İğneleme

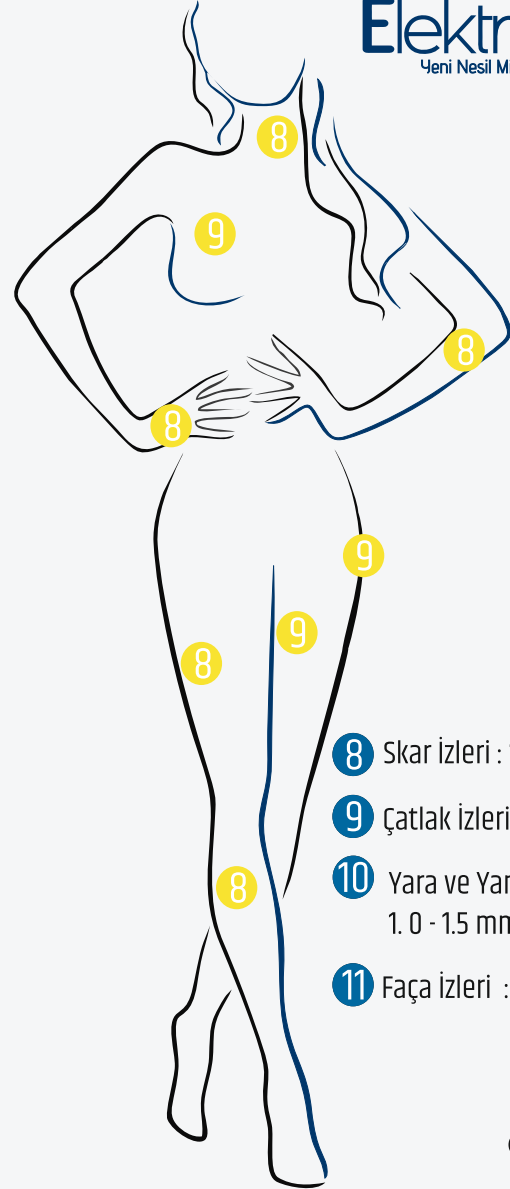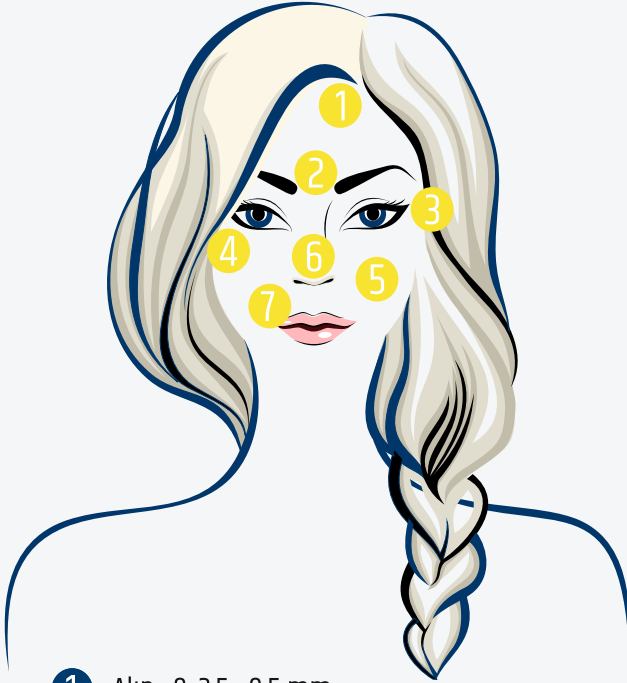

- 1 Alın : 0. 2,5 - 0.5 mm
- 2 Kaş arası : 0. 2,5 - 0.5 mm
- 3 Göz Çevresi : 0. 2,5 - 0.5 mm
- 4 Elmacık kemiği : 0.5 - 0.75 mm
- 5 Yanak : 0.5 - 1.0 mm
- 6 Burun : 0. 2,5 - 0.5 mm
- 7 Dudak Üstü : 0. 2,5 mm

- 8 Skar izleri : 1. 0 - 1.5 mm
- 9 Çatlak izleri : 1. 5 - 2.5 mm
- 10 Yara ve Yanık izleri : 1. 0 - 1.5 mm
- 11 Faça izleri : 1. 5 - 2.5 mm

Tedavi Yöneleri

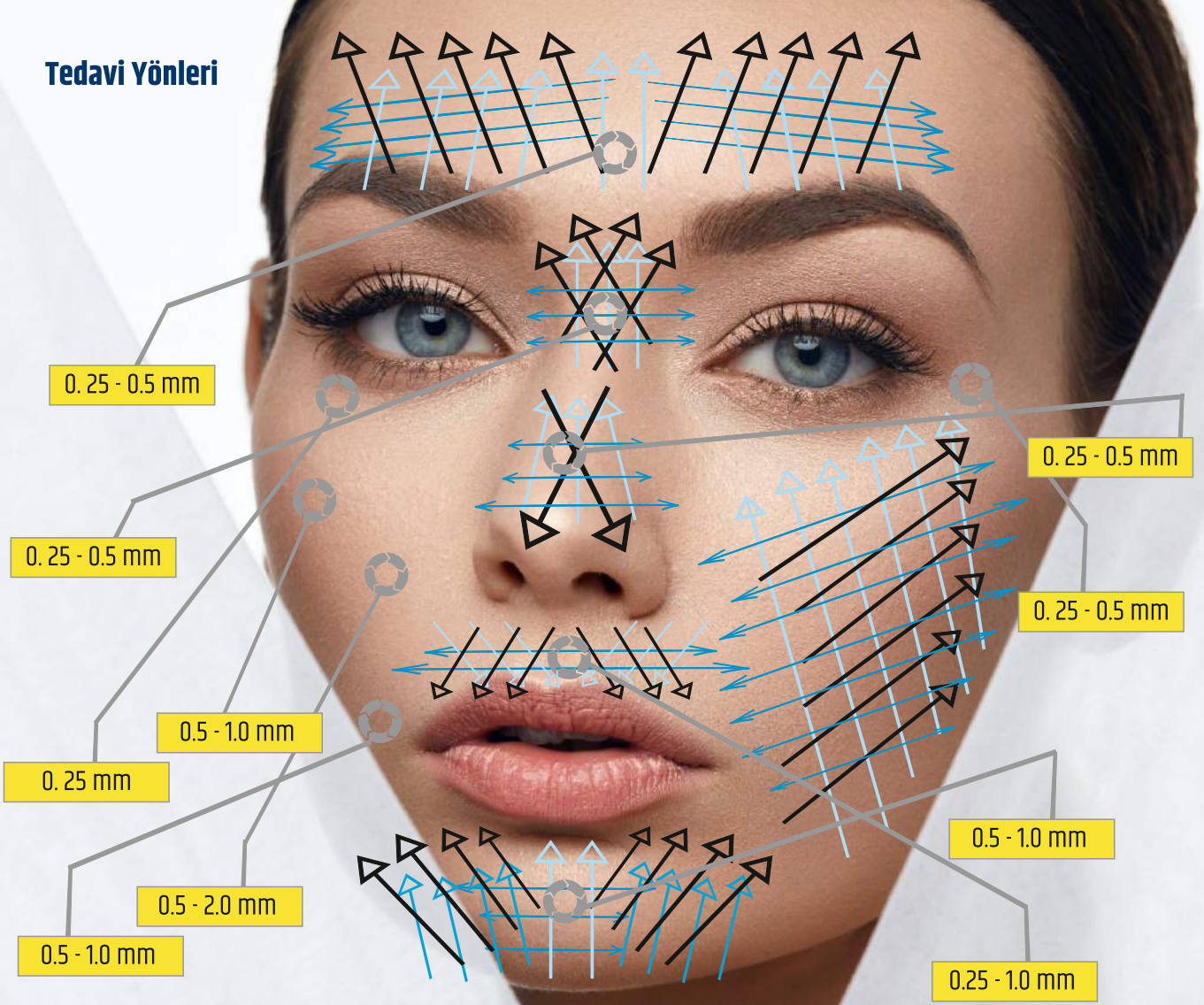

**Not: Yuvarlaklar yapmayın. Bu uygulama için gerekli değildir.
Tedavide kolajen oluşum yönünde değişime neden olabilir.**

ElektroPen Genel Özellikleri

- ➔ Vücudun doğal onarım, yenilenme ve iyileşme sürecini harekete geçirir.
- ➔ Fraksiyonel Lazerlere kıyasla ağrısız, ısısız ve iyileşme süreci olmadan etkili tedavi imkanı sağlar.
- ➔ Göz, dudak, kulak, kafa derisi, vücut gibi değişik uygulama alanları için yenilikçi çözümler sunar.
- ➔ Topikal cilt bakım ürünlerinin emilimini artırır.
- ➔ Çapraz enfeksiyona yol açmayan steril prosedürlerdir.
- ➔ PRP, kimyasal peeling ve ilaç infüzyonu gibi kombinasyon terapilerin etkinliğini artırır.
- ➔ Minimum epidermal hasar ile yoğun acı hissini ve kanamayı engeller.
- ➔ Saniyede 1300' e varan mikro kanal ve 2.5 mm ye kadar ayarlanabilirlik derinlik.
- ➔ Daha az acı, daha konforlu işlem.
- ➔ Dikey kullanımı sayesinde iğneler bükülmeden kolayca penetre olur.



ElektroPen

Yeni Nesil Mikro İğneleme



“Aesthetic Solutions”

“ElektroPen” bir Elektro Medikal markasıdır.”